

### 1.3- Analysering av kvalitetskontroll

- **Forberedelser:**


Ta kvalitetskontrollen ut av kjøleskapet og forvarm den til romtemperatur i 20 minutter.

- **Prosedyre i Normal i CRP-mode:**


Velg: [Mode] --> [QC] --> [CRP N] --> bland kontrollen --> ta av korken og plasser kontrollen i prøveholderen.




Fra hovedbildet velg [Mode]

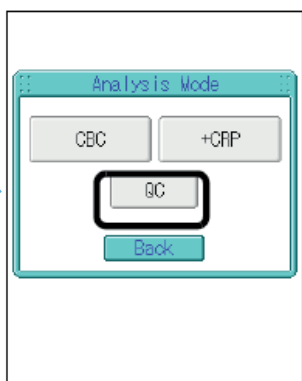

Velg [QC]

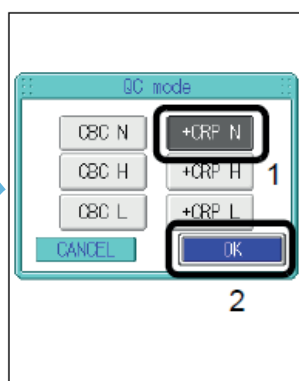


Velg kontrolltype [CRP N]

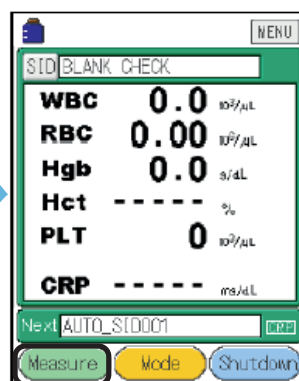


Velg [Measure]



Velg [USER-01]  
Kan velges bort i Instillinger.

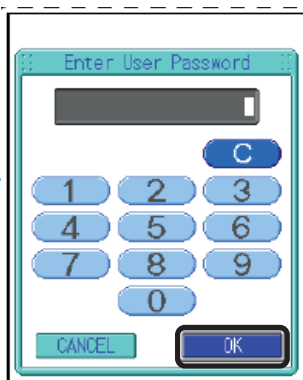

Legg inn passord. Trykk så OK. Kan velges bort i Instillinger.

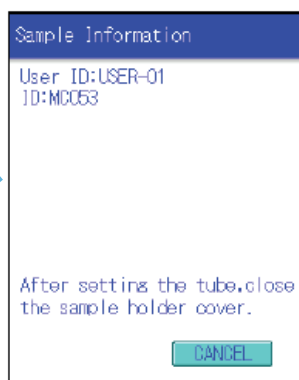


Kontroller informasjonen



Vend kontrollen rolig opp og ned 20-30 ganger.  
Hastighet: 1 rotasjon per sekund  
Sørg for at det ikke blir store bobler

Ta korken av glasset. Bruk en lofri klut og tørk blodet av toppen av kontrollglasset. Sett glasset i prøveholderen. Lukk prøveholderen. Instrumentet starter automatisk.

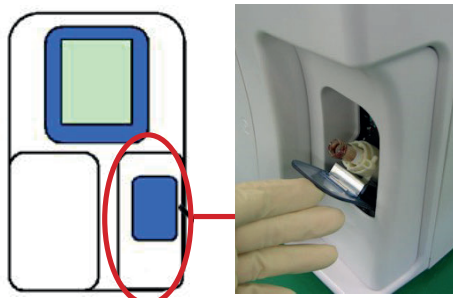

Resultat vises etter  
- 1 min for CBC  
- 4 min for CBC + CRP

Trykk på [YES] for å lagre resultatet

