

Hvordan rengjøre og desinfisere din Microsemi CRP LC-667G / LC-767G på en trygg måte?

Generelt tåler diagnostiske instrumenter overflatedesinfeksjon - det vil si det ytre dekselet.

For skjermer og spesielt berøringsskjermer (touch skjerm) kan desinfeksjonsmiddel være ødeleggende. I verste fall må hele skjermen byttes, noe som innebærer en betydelig kostnad.

Nedenfor finner du tips for å rengjøre og desinfisere din Microsemi CRP på en trygg måte.

Fuktig - men ikke våt

- Bruk et **PH-nøytralt desinfeksjonsmiddel**.

- Bruk en klut eller gasbind **lett fuktet** med desinfeksjonsmiddel, eller eventuelt kommersielle våtservietter med desinfeksjonsmiddel.

Forsikre deg om at kluten/gasbindet ikke er for våt.

Vi erfarer at overflatedesinfeksjonssprit kan brukes uten fare for skade på skjermen, så sant dette påføres med en lett fuktet klut.



Produsenten Horiba Medical anbefaler fortynnet klorin i konsentrasjon under 1 %. Fukt en myk klut eller gasbind med løsningen og rengjør instrumentet og skjermen. Produsenten anbefaler å gå over med en ny klut fuktet med vann for å fjerne klorinrester, etter adekvat virketid. **Vær oppmerksom på at klor kan skade deler i metall.**

Ved spørsmål ikke nøl med å kontakte oss, vi hjelper deg gjerne.

Martin Oma
Produktsjef
Mob: 924 62 156

Nina Rismyhr
Produktsjef
Mob: 920 25 731

Ramon Stangnes
Serviceingeniør
Mob: 982 09 189